

内面累進レンズ カスタム設定

■ FF i カスタム

カスタム設定可能

このマークが付いている商品

収差を最小限に抑えた高いビジュアルパフォーマンス

Point ① 各種データ入力による収差の最小化

Point ② 網膜像評価設計

予測された光軸を通った像が正確に結像するように
予め計算し、最適に補正を行います。

Point ③ 自動インセット

屈折率および各種データ入力に基づき、0.1mmステップ
で最適化をおこないます。


Point ④ 両眼視の最適化

レンズ厚の最適化

Point ① 数値入力によりレンズ厚を自動計算


Point ② 中心厚を薄くすることが可能

Point ③ フレーム形状にあわせたプリズムシニング

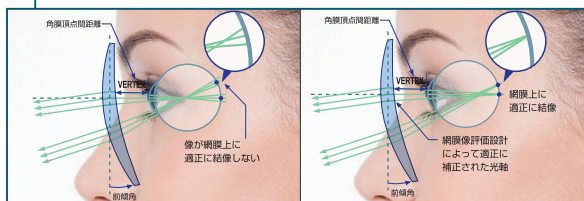


カスタマイズ パラメーター


■ 角膜頂点間距離

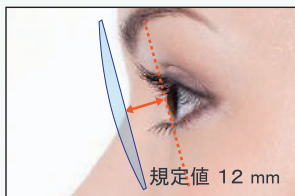

■ そり角

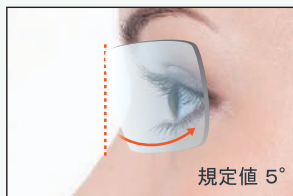


■ 前傾角


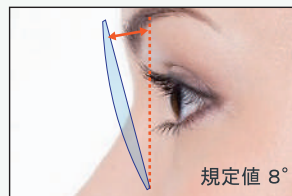


カスタマイズ ポイント

■ 瞳孔間距離 (PD)

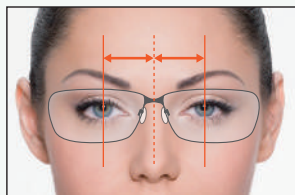


■ フィッティングハイト (OCH)

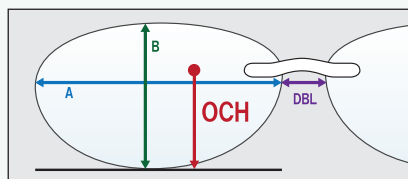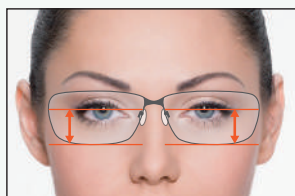


アイポイントからリム形状最下端までの距離

■ 近用作業距離

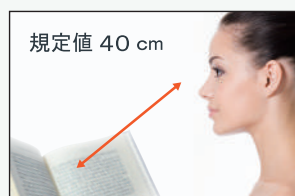

■ フレームデータ

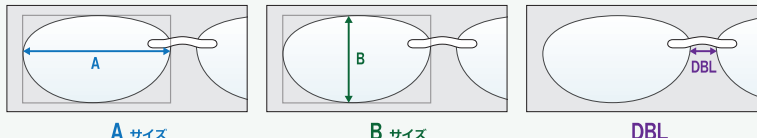

A サイズ

B サイズ

DBL

□ フレーム種類

セル

メタル

溝掘り

穴あけ

□ 玉型データ

※ 全て右側のレンズを表記しています



■ FD (アイポイントからリム形状の一番遠い部分までの距離)

※ 上記「玉型データ」選択での製造時に、外径不足を生じさせないための数値となります。

注 ① 指定がない場合は全て規定値で製作します。

注 ② 外径指定を行った場合、全ての項目が入力できなくなります。これは外径データを最優先とするため、フレームデータなどの数値が反映できなくなるためです。この場合、カスタマイズパラメーターおよび近用作業距離は全て規定値設定となります。

注 ③ 出来上がったレンズの度数確認を従来で行うと、補正された度数が表示されますので、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

内面累進レンズ カスタム設定

■ FF-iQ (74/67/60/56) カスタム

■ FF-itec (74/67/60/56) カスタム


カスタム設定可能

このマークが付いている商品

累進帯 … 10・11・12・13・14・15・16mm

※ 製作範囲はベーシックと同じ

レンズマーク

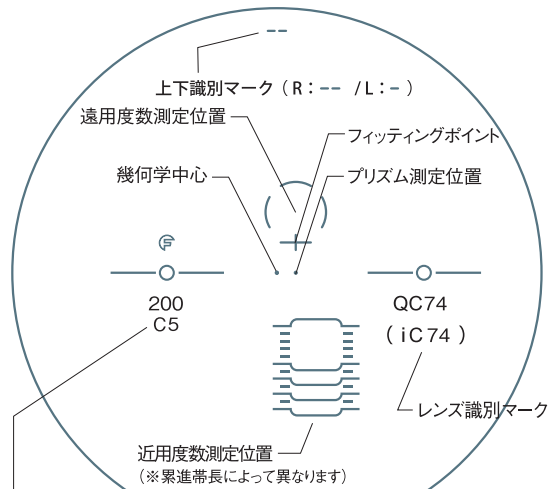

※累進帯長	識別マーク
10 mm	C0
11 mm	C1
12 mm	C2
13 mm	C3
14 mm	C4
15 mm	C5
16 mm	C6

■ 屈折率 1.74

	識別マーク
iQ	QC74
itec	iC74

■ 屈折率 1.67

	識別マーク
iQ	QC67
itec	iC67


■ 屈折率 1.60

	識別マーク
iQ	QC60
itec	iC60

■ 屈折率 1.56

	識別マーク
iQ	QC56
itec	iC56

レンズデザイン

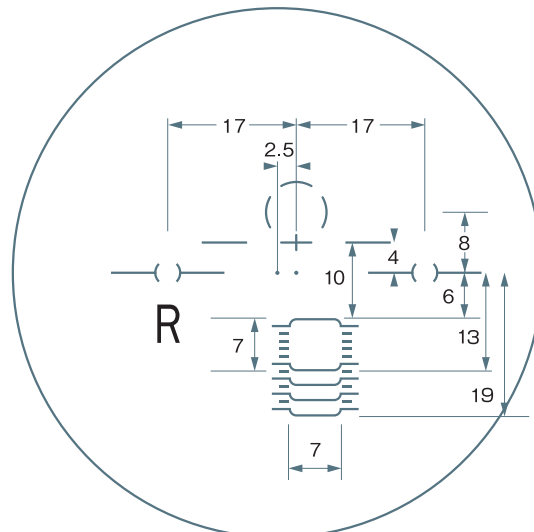

■ FF オフィス (74/67/60/56) カスタム

■ FF タブレット (74/67/60/56) カスタム

■ FF ノート (74/67/60/56) カスタム


カスタム設定可能

このマークが付いている商品

累進帯 … 21mm

※ 製作範囲はベーシックと同じ

レンズマーク

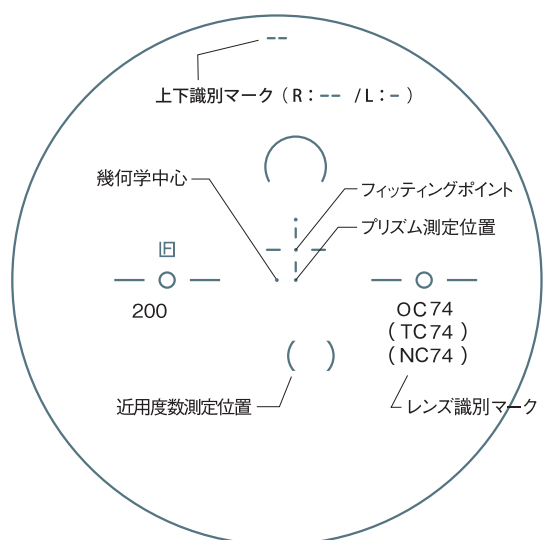

■ 屈折率 1.74

	識別マーク
オフィス	OC74
タブレット	TC74
ノート	NC74

■ 屈折率 1.67

	識別マーク
オフィス	OC67
タブレット	TC67
ノート	NC67


■ 屈折率 1.60

	識別マーク
オフィス	OC60
タブレット	TC60
ノート	NC60

■ 屈折率 1.56

	識別マーク
オフィス	OC56
タブレット	TC56
ノート	NC56

レンズデザイン

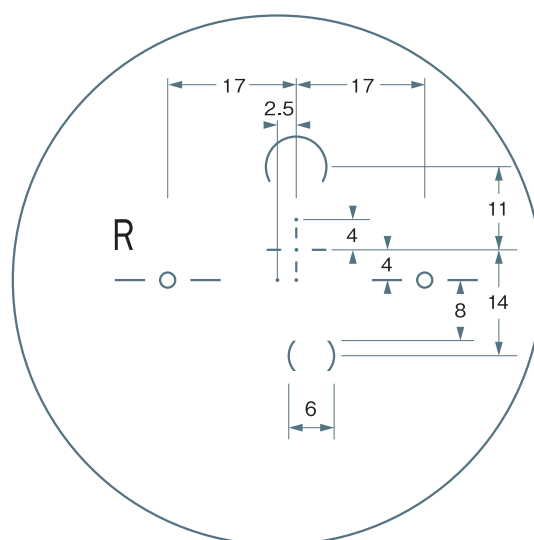

注 出来上がったレンズの度数確認を従来の方法で行うと、補正された度数が表示されますので、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

内面累進レンズ カスタム設定


■ FF-i アクセス (74/67/60/56) カスタム

カスタム設定可能

このマークが付いている商品

※ 製作範囲はベーシックと同じ

レンズマーク

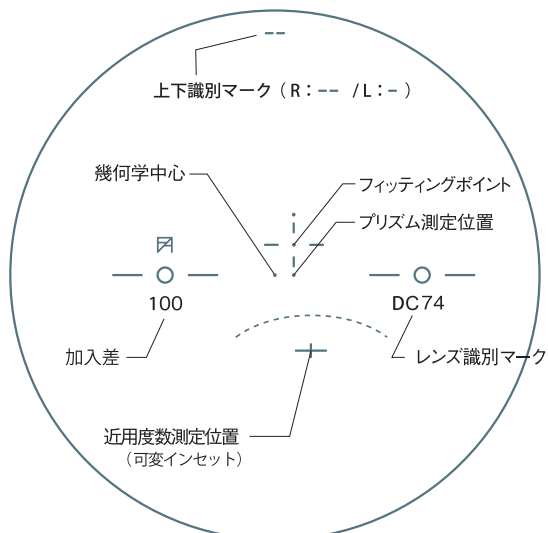

屈折率 1.74

	識別マーク
i アクセス	DC 74

屈折率 1.67

	識別マーク
i アクセス	DC 67


屈折率 1.60

	識別マーク
i アクセス	DC 60

屈折率 1.56

	識別マーク
i アクセス	DC 56

レンズデザイン

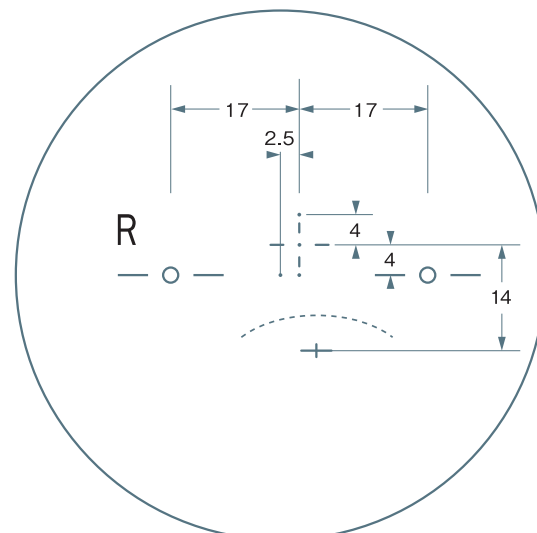


■ FF-i リフレ (74/67/60/56) カスタム

カスタム設定可能

このマークが付いている商品

※ 製作範囲はベーシックと同じ

レンズマーク

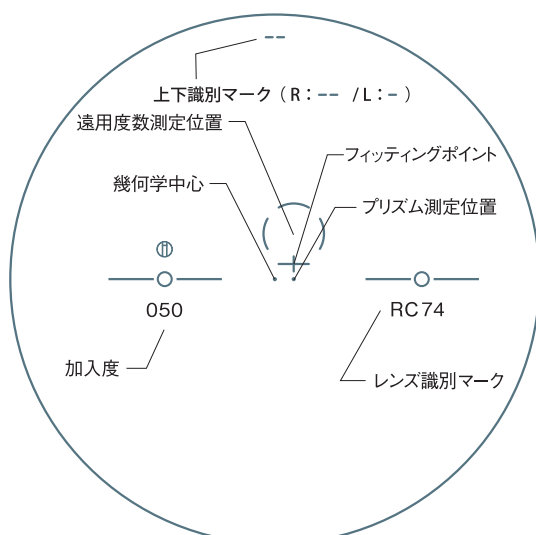

屈折率 1.74

	識別マーク
i リフレ	RC 74

屈折率 1.67

	識別マーク
i リフレ	RC 67


屈折率 1.60

	識別マーク
i リフレ	RC 60

屈折率 1.56

	識別マーク
i リフレ	RC 56

レンズデザイン

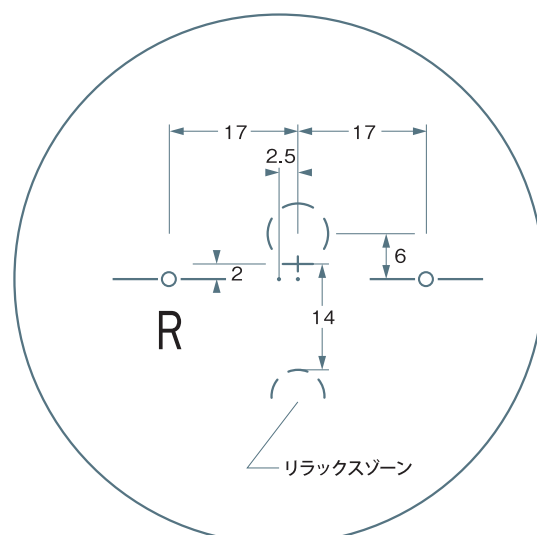

注 出来上がったレンズの度数確認を従来の方で行うと、補正された度数が表示されますので、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。